



Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

RIESGO DE CAÍDA DEL PACIENTE POR DAÑOS EN EL MOTOR DE ELEVACIÓN DE DETERMINADAS GRÚAS MÓVILES LIKO[®], VIKING[®] L, VIKING[®] M, VIKING[®] XL Y VIKING[®] 300

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2015

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.
Referencia: PS, 14/2015

La AEMPS informa de la posibilidad de que el motor de elevación de determinadas grúas móviles, fabricadas por Liko AB, Suecia, se dañe al accionar el brazo manualmente y pueda producirse la caída del paciente.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la empresa Liko AB, Suecia, de la posibilidad de que el accionador del brazo de elevación de determinadas grúas móviles Liko[®], Viking[®] L, Viking[®] M, Viking[®] XL y Viking[®] 300, se dañe y pueda producirse la caída del paciente.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, el conjunto del brazo de elevación está diseñado para ser elevado únicamente por el accionador (motor de elevación). Si el conjunto del brazo de elevación se levanta manualmente, el accionador se dañará y quedará atascado en la posición más elevada. Cuando se atasca el accionador, el motor de elevación no puede ni levantar ni bajar la grúa. Si se levanta a un paciente para colocarlo en una eslinga mientras el accionador se encuentra atascado, existe el riesgo de que se produzca la caída del paciente.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Hill-Rom Iberia, S.L., calle Comercio 2-22, Nave 14, Polígono Industrial El Pla, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona y antiguamente algunas unidades fueron distribuidas por la empresa Cambridge Equipamiento S.L, Pol. Ind Mutilva Baja Travesia A, 5, 31192, Mutilva Baja, Navarra.

SITUACIÓN ACTUAL

La empresa ha enviado una Nota de Aviso, para informar del problema detectado, a los establecimientos sanitarios y distribuidores que disponen o han suministrado los productos afectados en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y acciones a seguir y un suplemento a las instrucciones de uso con la advertencia de no elevar manualmente el brazo de elevación. Asimismo, la empresa Hill-Rom o uno de sus distribuidores, programará una inspección de todas las grúas afectadas y aplicará una etiqueta de advertencia de no levantar manualmente el brazo de elevación (figura 1).



Figura1. Imagen de la etiqueta de advertencia.

PRODUCTOS AFECTADOS

Grúa Viking[®] M:

Número de modelo 2040035 (nº de serie 9 200 000 – 9 203 000)

Número de modelo 2040015 (nº de serie 7 500 401 – 7 570 000)

Número de modelo 2040005 (nº de serie 7 100 101 – 7 200 200)

Viking[®] L:

Número de modelo 2040004 (nº de serie 7 200 201 – 7 300 300)

Viking[®] XL o Viking[®] 300:

Número de modelo 2040003 (nº de serie 800 001 – 804 999)



RECOMENDACIONES GENERALES

a) Distribuidores y ortopedias:

Si usted ha vendido o ha entregado alguno de los modelos y números de serie afectados de las grúas móviles Liko[®], Viking[®] L, Viking[®] M, Viking[®] XL y Viking[®] 300, a pacientes o centros sanitarios, intente identificarlos para facilitarles la nota de aviso y la etiqueta de advertencia, así como para programar la inspección de las grúas.

b) Pacientes y centros sanitarios:

Si usted dispone de alguno de los modelos y números de serie afectados de las grúas móviles Liko[®], Viking[®] L, Viking[®] M, Viking[®] XL y Viking[®] 300:

1. Póngase en contacto con la ortopedia en la que haya adquirido el producto o con la empresa que se lo suministró, para que le facilite la nota de aviso y la etiqueta de advertencia, así como para programar la inspección de su grúa.
2. En el caso de no poder contactar con la empresa que le proporcionó el producto, contacte con el servicio técnico de Hill-Rom Ibérica S.L., en el teléfono 902193423.

DATOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

Hill-Rom Ibérica S.L.,
C/ Comerç nº 2-22, Nave 14, Pol. Ind. El Pla.
08980 San Feliu de Llobregat (Barcelona).
Tlfnº: 902193423

Antiguamente:

Cambridge Equipamiento, S.L.
Pol. Ind. Mutilva Baja Travesía A nº 5,
31192 Mutilva Baja (Navarra).
Tlfnº: 948248455.